


Guide de référence rapide pour le guide-aiguille transpérinéal réutilisable EV29L

1. Retraitement avant la première utilisation et avant chaque utilisation


- A. Séparez toutes les pièces et jetez les bandes élastiques Kraton.
- B. Nettoyage au Cidezime, 5 minutes
 - Utilisez une brosse adaptée pour les pièces du guide-aiguille.
 - Rincez toutes les pièces, y compris les rainures, le rail et les canaux, avec le produit nettoyant.
- C. Stérilisation
 - Stérilisation : Autoclave de classe B
 - 134 °C pendant 3 minutes, temps de séchage : 45 minutes
 - 132 °C pendant 4 minutes, temps de séchage : 45 minutes
 - Sinon (en l'absence d'autoclave), désinfection de haut niveau : Cidex OPA, 12 minutes
 - Rincez toutes les rainures, le rail et les canaux avec le désinfectant.
 - Pendant la désinfection, essuyez la surface du guide à l'aide d'un chiffon doux afin d'éliminer les bulles
- D. Inspection après retraitement (aucune fissure, décoloration ou dommage visible)

2. Assemblage


- A. Sélectionnez la plaque porte-aiguille d'un calibre adapté à la procédure et placez-la dans la tour du guide-aiguille.
- B. Fixez la plaque porte-aiguille à la tour du guide-aiguille à l'aide de la bande élastique Kraton fournie.
- C. Insérez l'ensemble tour du guide-aiguille/plaque porte-aiguille dans le rail du connecteur du guide.
- D. Préparez le transducteur EV29L avec une gaine. Fixez le guide-aiguille assemblé dans le canal du guide-aiguille de l'EV29L de manière à ce qu'il s'enclenche. Facultatif : enroulez une bande élastique Kraton autour du transducteur et fixez-la à la cheville située sur le côté du connecteur du guide.

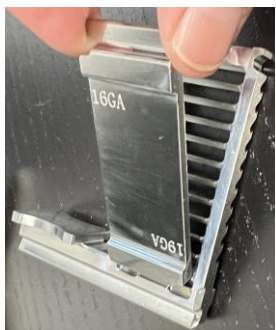


2A

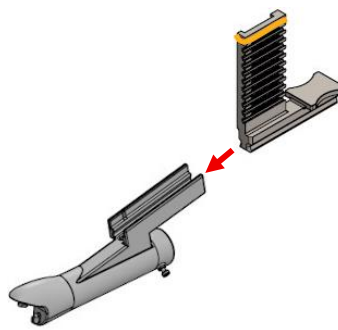

2B-2C

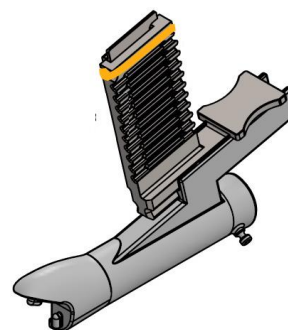

2C

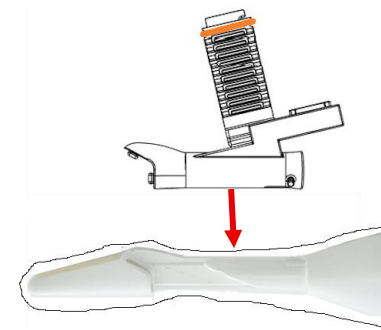

2D

3. Durée de vie utile

Lorsqu'il est utilisé avec soin, le guide-aiguille transpérinéal non stérile réutilisable EV29L est conçu pour une durée de vie utile de 2 ans ou 1 000 cycles de retraitement, selon la première éventualité.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez les manuels suivants :

Action	Manuel	Section du manuel
Retraitement (avant la première utilisation et avant chaque utilisation)	Guide d'entretien, de nettoyage et d'utilisation de la sonde à déclenchement latéral haute résolution EV29L	Chapitre 4 : Retraitement Sections 3.2, 3.3 et 3.5 : Retraitement des guide-aiguilles réutilisables et des accessoires* * Les instructions de nettoyage, de stérilisation et d'inspection s'appliquent également au guide-aiguille transpérinéal réutilisable EV29L, avec un temps de séchage de 45 min après la stérilisation.
Fixation du guide-aiguille assemblé au transducteur EV29L	Guide d'entretien, de nettoyage et d'utilisation de la sonde à déclenchement latéral haute résolution EV29L	Chapitre 3 : Préparation à l'imagerie Section 2.1.2 : Fixation du guide-aiguille transpérinéal stérile EV29L* * Ces instructions s'appliquent également au guide-aiguille transpérinéal non stérile réutilisable EV29L.
Ajustements logiciels	Manuel de sécurité et d'utilisation du système de micro-échographie haute résolution ExactVu™	Chapitre 5 : Utilisation du mode 2D Section 3.3.1 : Utilisation du guide-aiguille transpérinéal* * Ces instructions s'appliquent également au guide-aiguille transpérinéal non stérile réutilisable EV29L.

Si vous avez besoin d'une **assistance technique** pour votre système de micro-échographie ExactVu™ ou pour le guide-aiguille transpérinéal réutilisable EV29L, veuillez contacter le service d'assistance technique d'Exact Imaging. Rendez-vous sur <https://www.exactimaging.com/contact-us> pour trouver les coordonnées de votre région.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1 905 415 0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Pays-Bas



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Suisse

Responsable au Royaume-Uni
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Royaume-Uni



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgique

Numéros de référence Exact Imaging

- EV-29L : Transducteur EV29L
- EV-TPRG : EV29L Guide-aiguille transpérinéal non stérile réutilisable
- EV-SYS-220 : Système d'imagerie par micro-échographie ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120 : Système d'imagerie par micro-échographie ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100 : Système d'imagerie par micro-échographie ExactVu™ (100 V)