



Liste der genehmigten Chemikalien für ExactVu™-Sonden

Art der Chemikalie	Name der Chemikalie	Hersteller	Transrektale Sonde			Oberflächen-sonde	Validierte Einwirkzeit
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Reinigungsmittel	CIDEZYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 Minute
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 Minute
Mittel für eine hohe Desinfektionsstufe	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 Minuten
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 Minuten
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 Minuten
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 Minuten
Tuch/Spray	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 Sekunden
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 Sekunden (sporizid)

* Die FDA hat die von Metrex Research, Inc. hergestellte „Metricide Activated Dialdehyde Solution“ (2,6 % Glutaraldehyd, 14 Tage Wiederverwendung) als identisch zu Cidex® akzeptiert.

Tabelle 1: Liste der genehmigten Chemikalien

Die nachfolgenden Bilder zeigen die *Eintauchtiefe* für die Sonden.



Abbildung 1: Eintauchtiefe EV29L



Abbildung 3: Eintauchtiefe EV5C

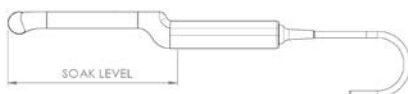


Abbildung 2: Eintauchtiefe EV9C

VORSICHT
EN-C25



Tauchen Sie die Sonde nicht über die Eintauchtiefe hinaus in die Reinigungslösung ein.

HINWEIS



Verwenden Sie Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die für die Verwendung in Ihrer Region zugelassen sind.

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen des Herstellers der entsprechenden Desinfektions- und Reinigungsmittel.

Anweisungen zur Wiederaufbereitung zwischen den Anwendungen und Angaben zur *Eintauchtiefe* finden Sie im *Handbuch zur Pflege, Reinigung und Verwendung* Ihrer Sonde.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Die Niederlande



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Schweiz



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgien



UK
Verantwortliche
Person

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Vereinigtes Königreich

Marken

Exact Imaging-Marken:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® und ENZOL® sind eingetragene Marken von Johnson & Johnson.
Revital-Ox™ ist eine Marke von Steris Corporation. Resert® ist eine eingetragene Marke von Steris Corporation.

Transeptic® ist eine eingetragene Marke von Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ ist eine eingetragene Marke von CIVCO Medical Solutions.

Exact Imaging-Bestellnummern

- EV-29L: EV29L-Sonde
- EV-9C: EV9C-Sonde
- EV-5C: EV5C-Sonde
- EV-SYS-220: Mikro-Ultraschallbildgebungssystem ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Mikro-Ultraschallbildgebungssystem ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: Mikro-Ultraschallbildgebungssystem ExactVu™ (100 V)

Versionsinformationen

System: Hochauflösendes Mikro-Ultraschallsystem ExactVu™

Liste der genehmigten Chemikalien für ExactVu™ Sonden, Revision 2.1 (DE), *Übersetzung der Originalanleitung*