

Lista de productos químicos aprobados para los transductores ExactVu™

Tipo de producto químico	Nombre del producto	Fabricante	Transductor transrectal			Transductor de superficie	Tiempo de contacto validado
			EV29L	EV9C SN 6750-	EV9C SN 6087-	EV5C	
Producto de limpieza	CIDEXYME®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minuto
	ENZOL®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	1 minuto
Desinfectante de alto nivel	CIDEX® OPA	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	✓	12 minutos
	CIDEX®	Advanced Sterilization Products	✓	✓	✓	x	45 minutos
	Revital-Ox™ Resert®	Steris Corporation	✓	✓	x	✓	8 minutos
	UltrOx™	CIVCO Medical Solutions	✓	✓	x	✓	8 minutos
Toallita / Spray	Transeptic® Spray	Parker Laboratories	x	x	x	✓	30 segundos
	Tristel Trio	Tristel Solutions	✓	✓	✓	✓	30 segundos (esporicida)

* La FDA ha aceptado que la "solución de dialdehído activado Metricide" fabricada por Metrex Research, Inc. (2,6% de glutaraldehído, reutilización durante 14 días) es idéntica a Cidex®.

Tabla 1. Lista de productos químicos aprobados

NOTA



Use productos de limpieza y desinfección autorizados en su área geográfica.

Siga las instrucciones de uso de los fabricantes de los desinfectantes y productos de limpieza.

Consulte en la *Guía de cuidados, limpieza y uso del transductor* las instrucciones de procesamiento entre un uso y otro, y la ubicación del nivel de inmersión.

Las imágenes a continuación muestran el nivel de inmersión de los transductores.

Lista de productos químicos aprobados para los transductores ExactVu™

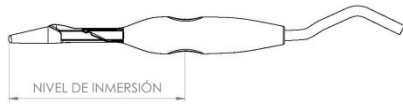


Figura 1. Nivel de inmersión del EV29L

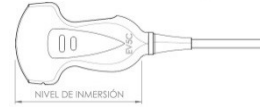


Figura 3. Nivel de inmersión del EV5C

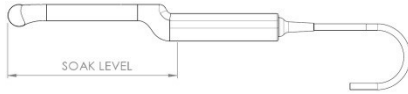


Figura 2. Nivel de inmersión del EV9C

PRECAUCIÓN

EN-C25



No sumerja el transductor más allá del nivel de inmersión.

Lista de productos químicos aprobados para los transductores ExactVu™

Prefacio



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canadá
+1 905 415 0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Países Bajos



EDAP TMS
4, rue du Dauphiné
69120 Vaulx-en-Velin
Francia



Marcas comerciales

Marcas comerciales de Exact Imaging:

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® y ENZOL® son marcas registradas de Johnson & Johnson.

Revital-Ox™ es una marca comercial de Steris Corporation. Resert® es una marca registrada de Steris Corporation.

Transeptic® es una marca registrada de Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ es una marca comercial de CIVCO Medical Solutions.

Números de referencia de Exact Imaging

- EV-29L: Transductor EV29L
- EV-9C: Transductor EV9C
- EV-5C: Transductor EV5C
- EV-SYS-220: Microecógrafo ExactVu™ (220 V)
- EV-SYS-120: Microecógrafo ExactVu™ (120 V)
- EV-SYS-100: Microecógrafo ExactVu™ (100 V)

Información de la versión

Sistema: Microecógrafo de alta resolución ExactVu™

Lista de productos químicos aprobados para los transductores ExactVu™, revisión 1.9 (ES), traducción de las instrucciones originales

